

iOSデバイスとの接続方法

2023年7月現在

アプリ接続の為の準備

App Storeで“Masimo”を検索すると、数種類のアプリがヒットしますが「**Masimo Personal Health**」をダウンロードしてください。その他のアプリをダウンロードいただいた場合、うまくペアリングができません。正しいアプリのダウンロードをお願いいたします。



バージョン: 2.4.30
OS要件: iOS 13.0以降、
iPadOS 13.0以降




ダウンロードはこちら

iOSデバイスへの接続

iOSデバイスのMasimo Personal Healthアプリのアイコンをタップしてアプリを起動し、iSpO2をデバイスへ接続します

- ① Masimo Healthに関するポップアップが表示されますので、「許可」をタップ
- ② Bluetoothの使用に関するポップアップが表示されますので、「OK」をタップ
- ③ ようこそ画面下「はじめに」をタップ
- ④ 「次へ」をタップ
- ⑤ ヘルスケアアプリのデータアクセスを許可しない場合は、左上の「許可しない」をタップ、許可する場合は許可する測定項目を選択し、右上の「許可」をタップ
- ⑥ 「スキップ」もしくは、名前、姓、生年月日、性別を選択し、「次へ」をタップ
- ⑦ TRAININGPEAKSを利用しない場合は「スキップ」をタップ、利用する場合は「次へ」をタップ
- ⑧ iSpO2を選択
- ⑨ センサーを指へ装着し、「次へ」をタップ
- ⑩ 数値、脈波形が表示されたら接続完了です

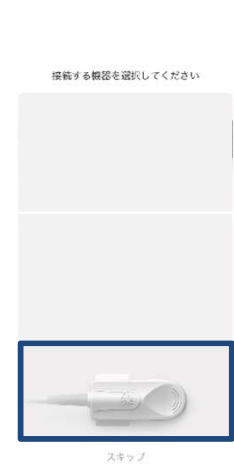

輸入・販売元:
マシモジャパン株式会社
〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー24階
http://www.masimo.co.jp